

Dominant Flex



POWER OF CHOICE



Dominant Flex – OP-Absaugpumpe

Dominant Flex

Die erste Medela Absaugpumpe mit wählbarer Saugleistung

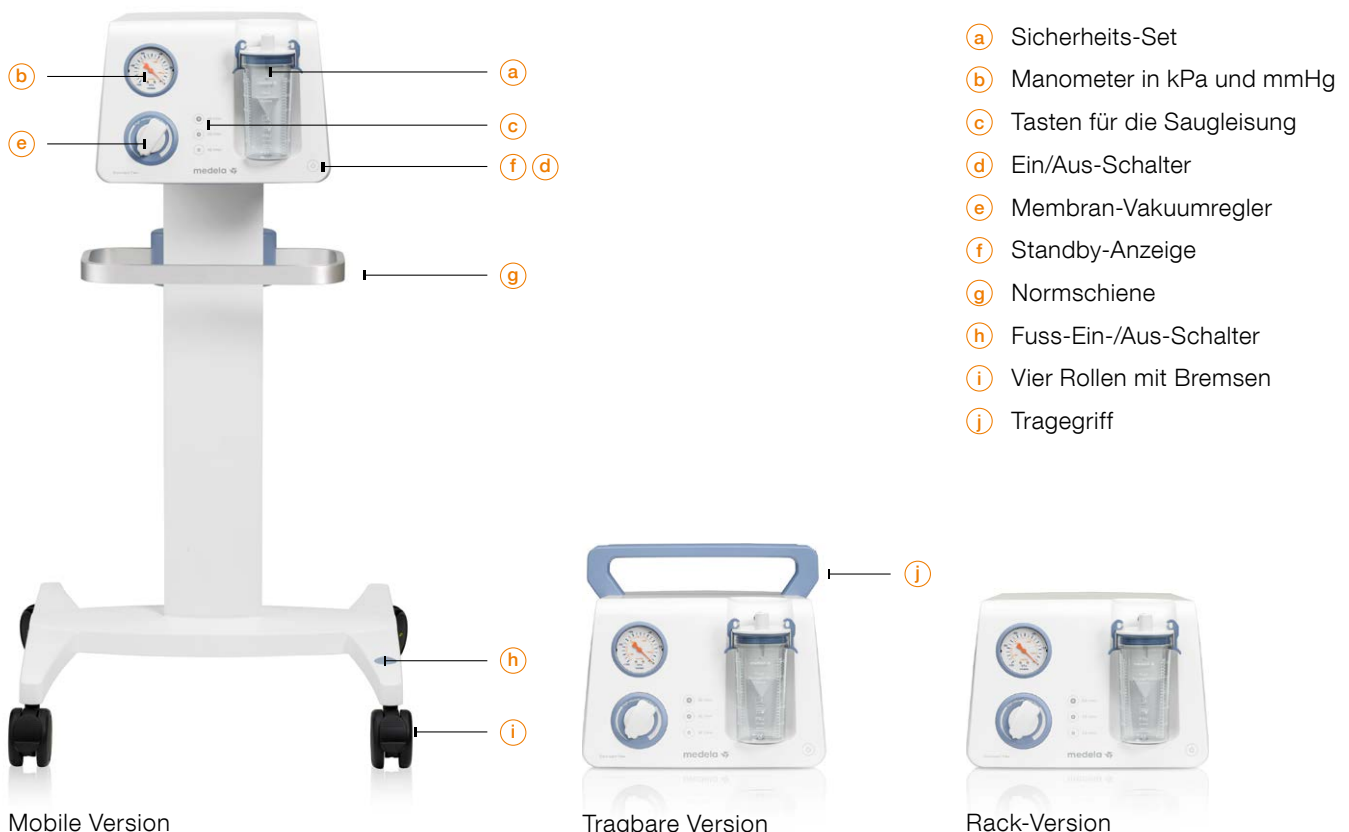
Zuverlässiges, einfaches und hygienisches Absaugen. Die Dominant Flex Absaugpumpe kann für allgemeine Absaugungen oder zur Unterstützung der zentralen Wandabsaugung im Krankenhaus, in der Tagesklinik oder der Arztpraxis für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Allgemeine Chirurgie, Liposuktion, Endoskopie, Absaugung der Atemwege, Neurochirurgie und Wunddrainage.

Wählen Sie Ihre Saugleistung. Es ist nicht mehr nötig, die Pumpe zu wechseln, wenn Sie eine andere Saugleistung benötigen. Die Standardeinstellung der Dominant Flex beträgt 50 l/min. Wenn Sie einen schnelleren Vakuumaufbau benötigen, berühren Sie die CleanTouch-Taste, um 60 l/min einzustellen. Bei heiklen Eingriffen, bei denen die Umgebung leise sein muss, berühren Sie einfach die 40-l/min-Taste, um den Geräuschpegel zu reduzieren.

Wählen Sie Zuverlässigkeit. Während der Entwicklung neuer Pumpen berücksichtigen wir stets die Bedürfnisse unserer Kunden. Medela verwendet widerstandsfähige Materialien, unterzieht neu entwickelte Konzepte ausgedehnten Testserien und setzt intelligente Verfahrenstechniken ein. So können wir unsere Tradition langlebiger und hochwertiger Pumpen auch weiterhin fortsetzen.

Wählen Sie Ihren hygienischen Schutz. Das Gehäuse der Dominant Flex, die CleanTouch-Tasten und die Anordnung der Bedienelemente sind so konzipiert, dass die für die Reinigung benötigte Zeit verkürzt ist. Für zusätzlichen Schutz können Sie aus einem breiten Sortiment an Filtern auswählen. Unsere Auffangsysteme bieten einen integrierten Schutz.

Eine einfache Wahl. Unser Expertenteam hat eine ausgeklügelte Konstruktion mit einer einfachen Bedienung verbunden. Der Innenaufbau der Dominant Flex reduziert die Wartungszeit. Die One-Touch-Bedienung ist intuitiv und einfach; LEDs zeigen den Betriebszustand an.



Power of Choice

Die Dominant Flex ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität. Sie können eine einzige Pumpe für unterschiedliche Anwendungen einsetzen. Die Standardsaugleistung von 50 l/min ist am Anfang ideal für die meisten Anwendungen. Sollten Sie einen schnelleren Vakuumaufbau benötigen, genügt eine einfache Berührung der 60-l/min-Taste, um den Turbomodus der Absaugpumpe zu starten. Die Berührung der 40-l/min-Taste führt sofort zu einem geräuscharmen Betrieb.



Veränderung der Saugleistung mit einer einzigen Berührung

Schweizer Zuverlässigkeit

Medela erfüllt alle Erwartungen, wie sie an das Gütezeichen „Made in Switzerland“ gestellt werden. Mit über 50 Jahre Erfahrung in medizinischer Vakuumtechnologie haben wir eine moderne Kolben-/Zylinder-Antriebseinheit entwickelt. Hitzebeständiges Hightech-Material gewährleistet einen langandauernden, zuverlässigen Betrieb. Patentierte Technologien und eine intelligente Bauweise führen zu geringerem Wartungsbedarf.



Hochwertige, langlebige Bestandteile

Sehr hygienisch

Hochwertige Gehäusematerialien, die auch starken Desinfektionsmitteln standhalten, und eine glatte, aus einem einzigen Stück bestehende Gehäusehaube erleichtern die Reinigung. Die CleanTouch-Technologie der Ein-/Ausschalttaste und der Schnellwahltasten für die Saugleistung bietet eine One-Touch-Bedienung ohne Ritzen und Fugen. Die Pumpe lässt sich dank des Fuss-Ein-/Aus-Schalters, der im Rollstativ integriert ist, freihändig bedienen.



Hygienisch dank intelligenter Bauweise

Raffinierte Einfachheit

Medela entwickelte die Dominant Flex Absaugpumpe für eine intuitive Bedienung und vielfältigen Einsatz. Das grosse Manometer lässt sich auf einen Blick ablesen. Mit dem leicht drehbaren Membran-Vakuumregler können Sie die Vakuumstufen genau einstellen. CleanTouch-Tasten erlauben Ihnen, die Saugleistung mit einer einfachen Berührung zu ändern. Die Pumpe ist als Rack-Version, tragbar und fahrbar erhältlich, je nach den Bedürfnissen in Ihrer Klinik. Die Einweg- und Mehrweg-Auffangsysteme von Medela wurden passgenau und funktional speziell für Medela Absaugpumpen entwickelt.



Zuverlässigkeit trifft moderne Technologie

Kurzinformationen

- Dominant Flex ist die erste Medela Absaugpumpe mit wählbarer Saugleistung. Sie bietet Ihnen die Wahl zwischen einem noch schnelleren Vakuumaufbau oder einem noch geräuscharmeren Betrieb.
- Unsere Schweizer Entwicklungs- und Herstellungsverfahren garantieren mechanische Präzision und dadurch eine ausgezeichnete Leistung.
- Zuverlässigkeit durch über 50 Jahre Erfahrung, angepasst an die Anforderungen von heute.
- Der vereinfachte Innenaufbau der Pumpe reduziert die Wartungszeit.
- Benutzerfreundlichkeit dank ausgeklügelter Konstruktion und einem grossen Sortiment an kompatibelem Zubehör.
- 5 Jahre Garantie.

Zubehör

Einweg-Auffangsystem

Einweg-Sekretbeutel im Mehrweg-PC-Behälter gewährleisten eine hygienische, einfache Anwendung und ein effizientes Sekretmanagement. Grössen: 1,5 und 2,5 Liter.



Schläuche

Schläuche aus Silikon oder PVC.



Mehrweg-Auffangsystem

Autoklavierbare PSU-Behälter mit Deckel fangen Sekrete einfach und effizient auf. Grössen: 1, 2, 3 und 5 Liter.



Fuss-Vakuumregler für freihändige Vakuumregulierung

Kann an Medela Standardbehälter angeschlossen werden.



Filter

Filter schützen die Pumpe vor dem Überlauf und die Umgebung vor Bakterien und sie neutralisieren den Geruch.



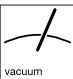
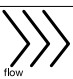

Fuss-Ein-/Aus-Schalter

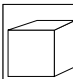

Kabellänge 3,5 m.

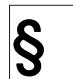







Ergänzen Sie Ihre Dominant Flex Pumpe mit Medela Zubehör für noch mehr Flexibilität und leichtere Bedienung.

Technische Daten

	Hochvakuum - 95 kPa - 713 mmHg
	Hohe Saugleistung 40 l/min 50 l/min 60 l/min
	9,3 kg (Rack-Version)

	H x B x T (Rack-Version) 210 x 305 x 375 mm
	Strom 100-240V

	ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EWG), IIa 5 Jahre Garantie		0123
			

Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals

Wenn Sie weiterführende Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns oder den für Sie zuständigen Medela Gebietsleiter.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Schweiz
www.medela.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch